

Multi-Gyn® Vaginal Douche

Multi-Gyn

PRED POUŽITÍM MULTI-GYN VAGINAL DOUCHE A TABLET SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÝ PRÍBALOVÝ LETÁK A UCHOVAJTE SI HO NA NESKORŠIE POUŽITIE

MULTI-GYN POŠVOVÁ SPRCHA NA OPTIMÁLNU HYGIENU POŠVY

- vyplachuje čisto, efektívne a šetrne
- špeciálny ventil, ktorý znemožňuje nasávanie tekutiny späť, zabráňuje nadmernému tlaku pri vyplachovaní a zabezpečuje ideálny vyplachovací efekt
- ergonomická pomôcka na vyplachovanie, ktorá sa dá použiť v rôznych polohách

INDIKÁCIE

Multi-Gyn Pošvová sprcha a tablety sú ideálne na bežnú hygienu pošvy. Sú tiež vhodné na intenzívnu hygienu pošvy v prípade výskytu nadmerného a nepríjemne zapáchajúceho výtoku, svrbenia, pocitu pálenia a podráždenia.

POKYNY NA POUŽITIE

Niektoré ženy sú náchyľnejšie na pošvový diskomfort (nepohodlie) ako iné kvôli životnému štýlu, sexuálnej aktivite, alebo menštruácii. V závislosti na potrebách osobnej hygieny je možné Multi-Gyn Pošvovú sprchu používať častejšie; avšak neodporúča sa používať Multi-Gyn Pošvovú sprchu viac ako jedenkrát týždenne, pokiaľ lekár neodporučí inak. Ak pošvové ťažkosti pretrvávajú, vždy kontaktujte lekára.


Multi-Gyn Pošvová sprcha môže byť použitá v viacerých želaných polohách. Nájdiť si najvhodnejší spôsob použitia Multi-Gyn Pošvovej sprchy. Je dôležité, aby vyplachovacia tekutina mohla počas výplachu voľne odtekať. Napríklad vo vani, sprche, alebo nad toaletnou misou. Pozrite si ilustrovaný návod na použitie Multi-Gyn Pošvovej sprchy.

MULTI-GYN POŠVOVÁ SPRCHA A TEHOTENSTVO

Ak si želáte otehotnieť, odporúčame vám nepoužívať Multi-Gyn Pošvovú sprchu do 3 dní po pohlavnom styku. Multi-Gyn Pošvová sprcha nie je antikoncepcia. Nie sú známe žiadne kontraindikácie na použitie Multi-Gyn Pošvovej sprchy, alebo Multi-Gyn Tableť počas tehotenstva, alebo dojčenia. Avšak vždy odporúčame, aby ste sa o použití Multi-Gyn Pošvovej sprchy v tehotenstve poradili s lekárom.

VEZMITE PROSÍM NA VEDOMIE!

Nikdy nedávajte Multi-Gyn Pošvovú sprchu do vriacej vody a tiež ju neoplachujte vriacou vodou. Zdeformuje sa a stane sa nepoužiteľnou, bez možnosti opravy.

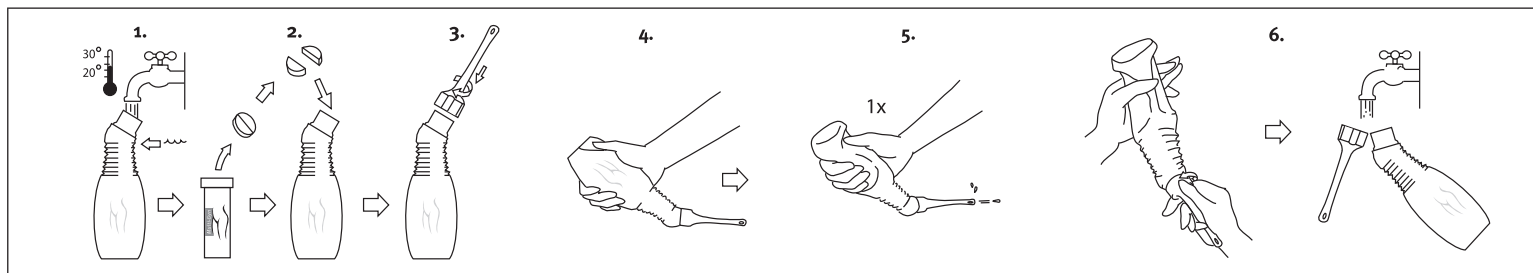

1. Naplňte Multi-Gyn Pošvovú sprchu vlažnou vodou až po horný okraj ohybov na fľaši.

2. Prelomte jednu Multi-Gyn tabletu a vložte ju do vody vo fľaši.

3. Naskrutkujte aplikátor na fľašu a počkajte, kým sa Multi-Gyn tableta úplne rozpustí a prestane šumiť.

4. Opatrne vsuňte aplikátor do pošvy.

5. Jemne stlačte fľašu, aby ste vyčistili pošvu vyplachovacou tekutinou. Je normálne, že vo fľaši po prevedení výplachu zostáva tekutina (až do polovice fľaše).*

6. Odskrutkujte aplikátor z fľaše, fľašu a aplikátor opláchnite teplou vodou a nechajte ich voľne vysušiť na suchom mieste.

*Množstvo vyplachovacej tekutiny je dostatočné na výplach pošvy. Ak chcete využiť tekutinu, ktorá vo vyplachovacej fľaši ostala, odskrutkujte aplikátor z fľaše tak, aby sa fľaša vrátila do pôvodného tvaru a pokračujte krokom 4.

Multi-Gyn® Tablets

Multi-Gyn

MULTI-GYN TABLETY VYTŤVÁRAJÚ PRÍRODNÝ A JEMNÝ VYPLACHOVACÍ ROZTOK VHODNÝ NA OPTIMÁLNU HYGIENU POŠVY

- jedna tableta je dostačujúca na jednu fľašu vyplachovacieho roztoku
- tableta obsahuje prírodné zložky a neobsahuje parfumy
- v kombinácii s Multi-Gyn Pošvovou sprchou, tablety ponúkajú optimálnu hygienu pošvy

VYPLACHOVACIE TABLETY S PRÍRODNÝM ZLOŽENÍM

Tablety sa rozpúšťajú vo vlažnej vode a vytvárajú jemný roztok na vyplachovanie, vhodný na použitie s Multi-Gyn Pošvovou sprchou. Koncentrované šumivé tablety obsahujú prírodné zložky.

ZLOŽKY PRÍPRAVKU

Laktóza, kyselina citrónová, natrium bicarbonát, kyselina mliečna, polysacharidy z listov Aloe Barbadensis, kyselina askorbová

Hlavná aktívna zložka – prášok 2QR-komplexu:

Patentované bio-aktívne polysacharidy získané z čisteného extraktu listov Aloe Barbadensis

Tablety majú zrnitý vzhľad a môžu sa trochu líšiť farbou. Tieto menšie odchýlky sa týkajú prírodných vlastností hlavnej aktívnej zložky, 2QR-komplexu. Neovplyvňujú bezpečnosť alebo účinnosť prípravku.

SKLADOVANIE

Udržujte mimo dosahu detí. Multi-Gyn tablety skladujte v originálnej tube a na suchom mieste s teplotou od 10 ° C do 25 ° C (izbová teplota).

